


Space^{plus} Perfusor[®]

Kurzanleitung



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aufbau des Geräts

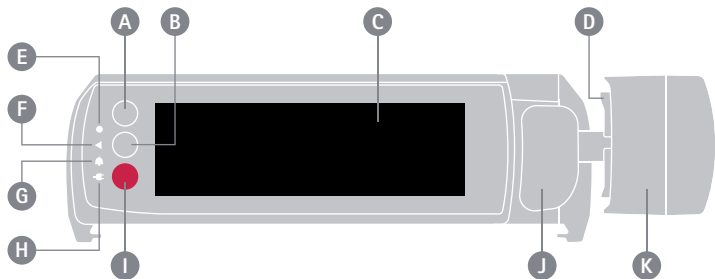


- A** Home-Taste
- B** Ein/Aus-Taste
- C** Touchdisplay
- D** Krallen
- E** Helligkeitssensor
- F** Förderungs-LED

- G** Alarmindikator
- H** Netzspannungs-LED
- I** Stop-Taste
- J** Spritzenbügel
- K** Antriebskopf




Einschalten & Selbsttest


1. Einschalten mit Ein/Aus-Taste

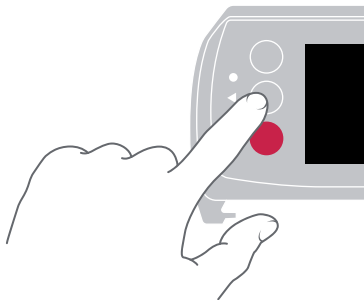


2. Funktionalität der Status-LEDs prüfen

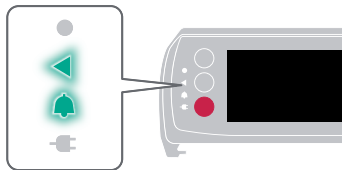

3. Funktionalität des Displays prüfen

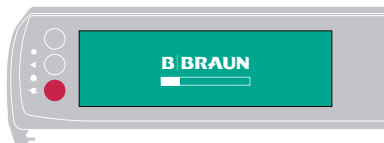


4. Krallen prüfen
(öffnen und schließen sich)

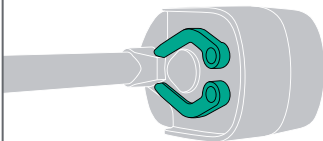


Spritze einlegen

1. Frontklappe öffnen, Spritzenbügel zu sich ziehen und nach rechts drehen

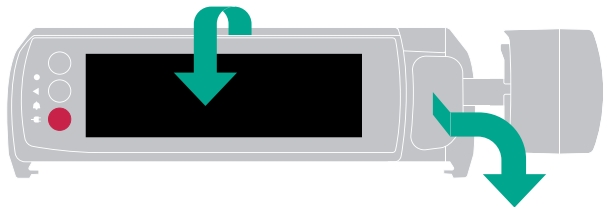


2. Spritze einlegen und Spritzenbügel schließen

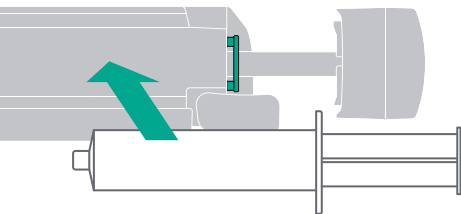

⚠ ACHTUNG


Spritzenflügel muss sich zwischen der Spritzenfixierung und dem Pumpengehäuse befinden

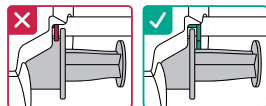

3. Frontklappe schließen und den Anweisungen auf dem Display folgen

Infusion programmieren

1. Home-Taste drücken

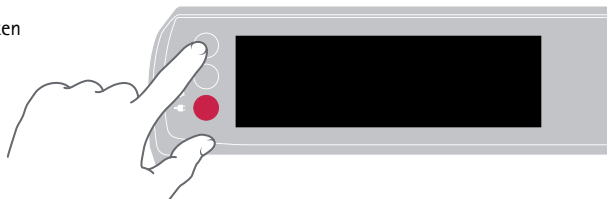


2. Neue Infusion anwählen




3. Instruktionen auf dem Display folgen

⚠ WICHTIG

Bolusgabe ist nur bei laufender Infusion möglich!

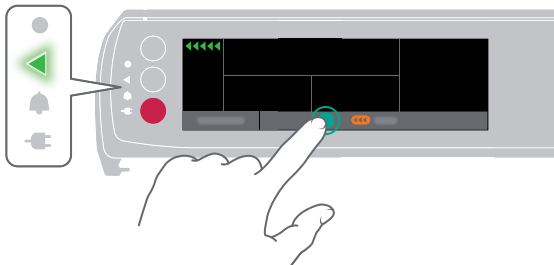

1.  Button auf dem Förderscreen drücken
2. Bolusart wählen



Programmierter Bolus

- Bolusmenge und Bolusdauer eingeben, um den Bolus zu definieren


Manueller Bolus

- Bolus wird gefördert solange der Button gedrückt wird.



Spritze wechseln




1. Infusion stoppen und Verbindung zum Patienten trennen

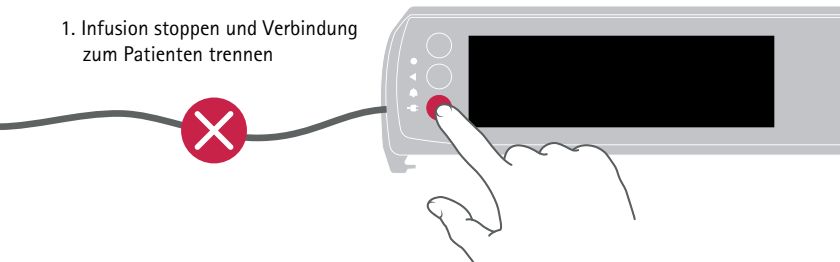

2. Frontklappe öffnen, Spritzenbügel zu sich ziehen und nach rechts drehen



3. Spritze ersetzen

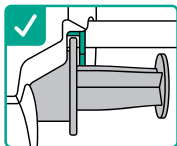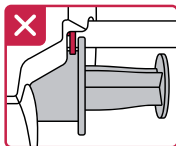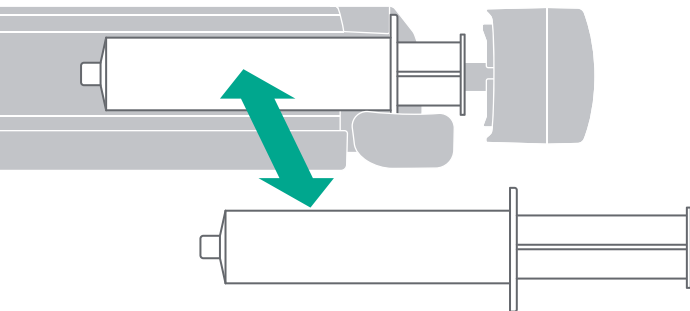

⚠ ACHTUNG

Spritzenflügel muss sich zwischen der Spritzenfixierung und dem Pumpengehäuse befinden

4. Frontklappe schließen und den Instruktionen auf dem Display folgen


Voralarm

⚠ WICHTIG

Infusion läuft bei
einem Voralarm
weiter



1. Mit dem ~~X~~ Button den Voralarm stummschalten
2. Eine kleine Version des Alarmfensters ist weiterhin auf dem Display zu sehen

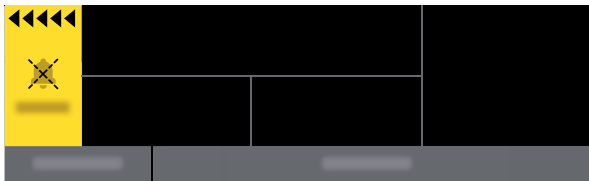


Wiederholt sich automatisch!

⚠ WICHTIG

Infusion wird bei einem Betriebsalarm gestoppt!



1. Mit dem  Button den Alarm stummschalten und bestätigen
2. Eine kleine Version des Alarmfensters ist weiterhin auf dem Display zu sehen




Infusion fortsetzen


- Fehlerursache beheben und Infusion fortsetzen

Druckstufe auswählen


1. Home-Taste drücken

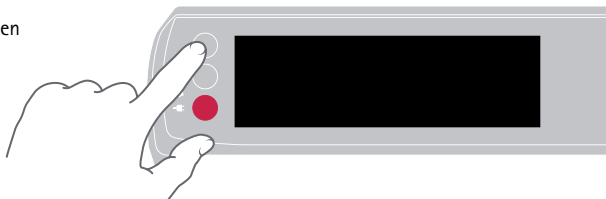


2. Druckstufe anwählen

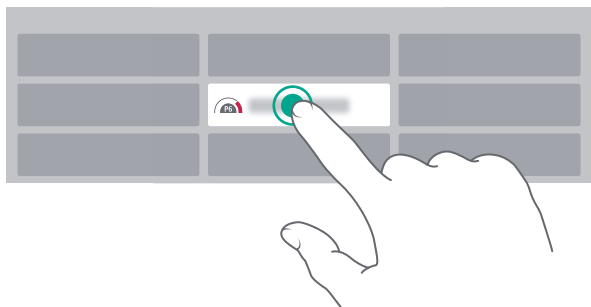

3. Druckstufen-Menü

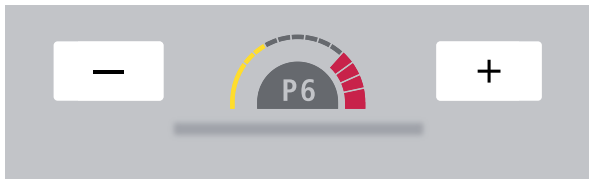

4. Der Förderscreen zeigt den anliegenden Systemdruck und Abschaltdruck

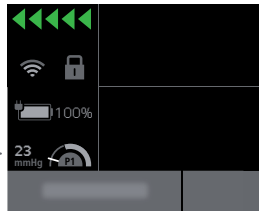


Der weiße Zeiger des Manometers zeigt den aktuellen Druck im Infusionssystem an. Je niedriger die gewählte Druckstufe ist, desto größer wird der graue Bereich des Manometers. Sobald der Zeiger in diesen grauen Bereich gelangt, wird ein Druckalarm ausgelöst.

Standby / Ausschalten

Ein/Aus-Taste drücken

>2s

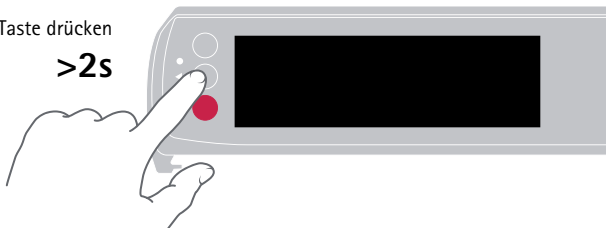

Mit eingelegter Spritze

- ▶ Pumpe geht in den Standby-Modus



Ohne Spritze

- ▶ Pumpe schaltet sich aus

DE Scanne den QR-Code und finde die Gebrauchsanweisung unter der Artikelnummer 8719030
GB Scan datamatrix and find the Instruction for Use via the article number 8719030



B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147 - 70 00
E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen

HD.00,5.02.22/1 | Nr. 4007283 | 04/2022